

Chirurgie
Gynécologique.



Manipulation utérine.




Les manipulateurs utérins sont fréquemment utilisés pour présenter l'utérus afin de permettre, par des mouvements d'antéversion/ rétroversion, la visualisation complète de l'utérus ainsi que de ses annexes : l'exposition des différents ligaments utéro-sacrés ainsi que du cul-de-sac de Douglas lors du traitement chirurgical de l'endométriose.

Ils permettent par ailleurs lors des hystérectomies totales, de maintenir le pneumopéritoine et de délimiter les plans du fond vaginal.

Manipulation utérine pour **hystérectomie totale**.

MAUT60 avec ballonnet détachable

Valve guide de coupe : précision de la colpotomie.

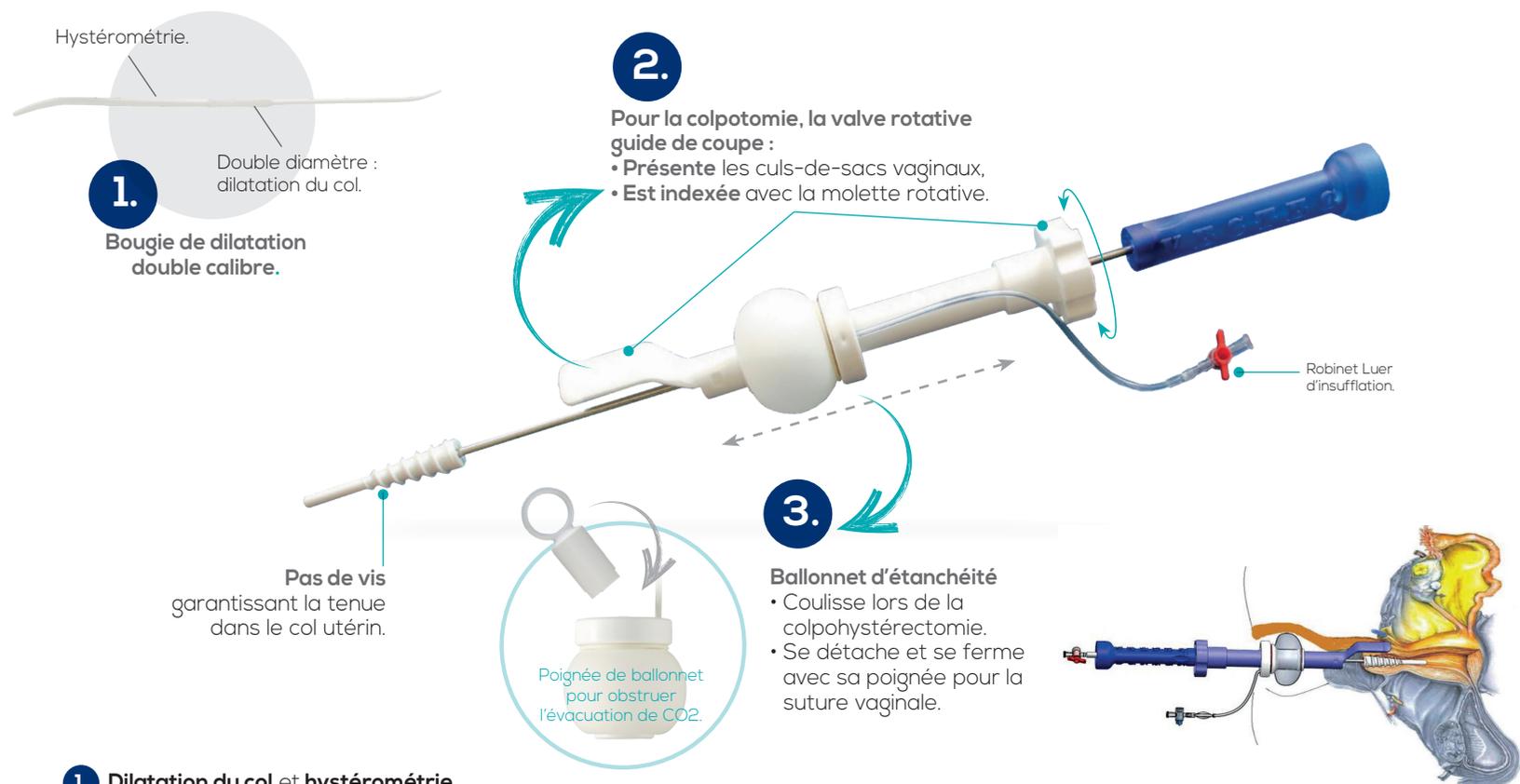

- 1. Dilatation du col et hystérométrie.**
- 2. Colpohystérectomie** avec la valve de découpe et étanchéité assurée par le ballonnet.
- 3. Suture vaginale** grâce au ballonnet détachable et à sa poignée.



Code	Description	Qté/boîte
MAUT60	Manipulateur utérin • Bougie de dilatation • Poignée de ballonnet	10

Uterine Elevator Pro™ avec ballonnet détachable

Facilité de mise en place.



1.

Cupule adaptée.

Différents diamètres disponibles :
Ø 32-35-37-40mm.



2.

Verrouillage/ position de la cupule.

Ballonnet distal atraumatique (10cc air) assurant une bonne tenue du manipulateur dans la cavité utérine.



3.

Manipulation facilitée par :

- l'incurvation du dispositif,
- la rigidité de la tige,
- la poignée ergonomique.



Ballonnet "inflaté" 90-120cc de saline.

Colpohystérectomie et suture vaginale avec le ballonnet détachable.

Ballonnet pilote

permettant de contrôler l'inflation du ballonnet distal.

1. **Choix du diamètre** de la cupule.
2. **Positionnement** de la cupule sur le col et **verrouillage**.
3. **Manipulation** grâce à une **poignée ergonomique**.


Code	Description	Qté/boîte
UE-OBPRO-32	Manipulateur utérin • Cupule ø 32 mm	8
UE-OBPRO-35	Manipulateur utérin • Cupule ø 35 mm	8
UE-OBPRO-37	Manipulateur utérin • Cupule ø 37 mm	8
UE-OBPRO-40	Manipulateur utérin • Cupule ø 40 mm	8

Manipulation utérine.

Uterine Position OR™ Ballonnet intra-utérin atraumatique.

Utilisé principalement pour :

- Hystérosalpingographie.
- Hystérectomie supracervicale.

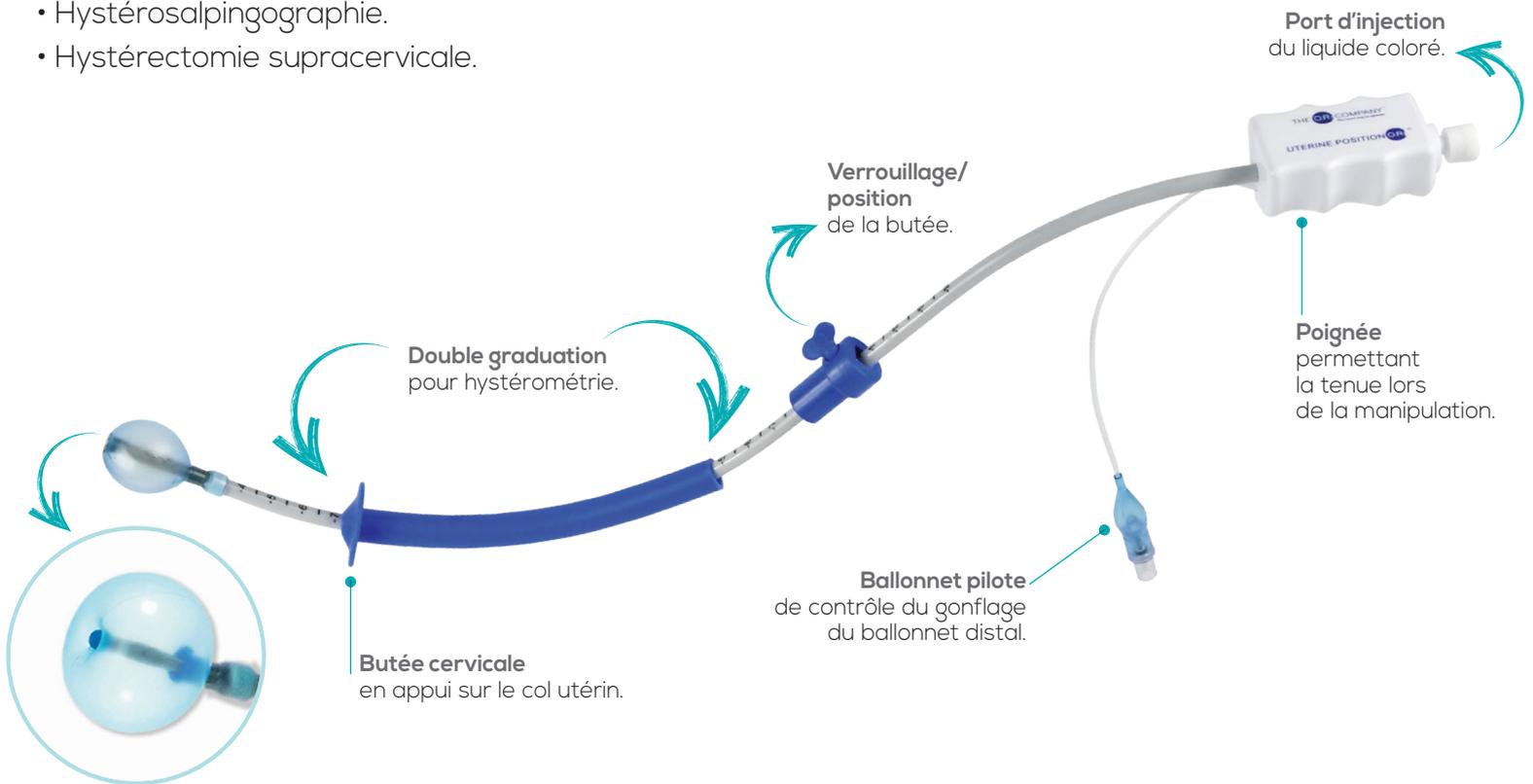

Port d'injection
du liquide coloré.

Verrouillage/
position
de la butée.

Double graduation
pour hystérométrie.

Poignée
permettant
la tenue lors
de la manipulation.

Ballonnet pilote
de contrôle du gonflage
du ballonnet distal.

Butée cervicale
en appui sur le col utérin.

Ballonnet recouvrant
intégralement l'embout
(10cc air).

Code	Description	Qté/ boîte
UE-POR	Manipulateur utérin	8



Références.

Instruments de Coeliochirurgie.

Uterine Position OR™ 2

INDICATIONS

L'Uterine Position OR™ est indiqué pour la manipulation de l'utérus, et l'injection de fluides lors des procédures laparoscopiques, y compris l'hystérectomie laparoscopique supracervicale, la ligature des trompes par mini-laparotomie, l'occlusion tubaire laparoscopique ou la laparoscopie diagnostique.

Uterine ElevatOR PRO™ avec OccludOR Balloon²

INDICATIONS

L'Uterine ElevatOR PRO™ avec OccludOR Balloon est indiqué pour la manipulation de l'utérus et l'injection de liquides ou de gaz au cours de procédures laparoscopiques, notamment lors des hystérectomies totales par laparoscopie, des hystérectomies vaginales assistées par laparoscopie, des occlusions tubaires par laparoscopie et des laparoscopies de diagnostic. L'Uterine ElevatOR PRO™ avec OccludOR Balloon maintient le pneumopéritoine pendant les procédures laparoscopiques en fermant le vagin une fois la colpotomie effectuée.

Manipulateur Utérin Chirurgical MAUT60¹

INDICATIONS

Le manipulateur utérin chirurgical Peters Surgical est un dispositif médical à usage unique destiné exclusivement à la chirurgie gynécologique. Il ne doit être manipulé que par des praticiens dûment qualifiés et entraînés. Le manipulateur utérin chirurgical est destiné à exposer l'utérus (déplacements dans la cavité abdominale). Il permet en outre de faciliter la présentation du fond vaginal lors d'hystérectomie totale, tout en conservant le pneumopéritoine.

1. Dispositif Médical Classe IIa - CE 0459 - Fabricant : Peters Surgical.
2. Dispositif Médical Classe IIa - CE 2797 - Fabricant : The OR Company

Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation des produits. Présentation à destination des employés et distributeurs de Peters Surgical ainsi que des professionnels de santé.

Peters Surgical Headquarters & French Affiliate

Immeuble AURELIUM,
1 cours de l'Île Seguin,
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0)1 48 10 62 62
peters@peters-surgical.com



[peters-surgical.com](https://www.peters-surgical.com)